

Amnioskop med integrert lys

Skyggefritt lys reduserer risiko og forbedrer undersøkelse for mor og barn

Med Cruinn Medicals amnioskop med integrert lys slipper man å bruke en ekstern lyskilde med lyskabel som tynger armen og er i veien. Når man trekker ut obturatoren på amnioskopet slås det integrerte lyset automatisk på, og gir godt, skyggefritt lys.

Amnioskopene er leveres sterile og klare til bruk rett fra pakken. De er engangsutstyr, men kan benyttes til flere undersøkelser på samme pasient i løpet av fødselen.

Amnioskopene brukes slik:

1. Åpne pakken og ta ut amnioskopet. Sjekk at lyset virker ved å trekke ut obturatoren. Sett obturatoren på plass igjen.
2. Før amnioskopet inn i vagina. Trekk ut obturatoren. Lyset slås på automatisk.
3. Ta prøvene som trengs. Sett inn igjen obturatoren og trekk ut amnioskopet.
4. Skopet kan brukes om igjen dersom flere prøver må tas på samme pasient.



Amnioskopet har lys som tennes automatisk når obturatoren trekkes ut av amnioskopet



1. Amnioskop med integrert lys, 28 mm diameter
2. Amnioskop med integrert lys, 18 mm diameter

Bestillingsinformasjon

Amnioskop med integrert lys, 28 mm diameter
Amnioskop med integrert lys, 18 mm diameter

Artikkelnr.

ELA 01
ELA 02

Antall

Eske á 5 stykk
Eske á 5 stykk

