

A.4513LINS

A.4520LINS

A.4525LINS

A.4525VLINS

**Kit Rettoscopi a LED incorporato con insufflatore.**

**Kit Rectoscopes with built-in LED light with insufflator.**

**sapi med**

DIAGNOSTIC  
LINE



I **rettoscopi monouso di Sapi Med** sono perfettamente lisci e realizzati in materiale plastico con serigrafia graduata; ogni tubo è munito di impugnatura con lente di ingrandimento, connettore per insufflatore d'aria, insufflatore d'aria monouso e illuminazione a LED incorporata. La fascetta bianca alla base del manipolo permette l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione. La stessa intensità di luce è garantita fino a due ore di utilizzo continuato. Esaurite le batterie, sollevando la levetta nera posizionata sull'impugnatura, il manipolo si apre facilmente per lo smaltimento differenziato delle parti che lo compongono (metallo, pile, plastica).

La caratteristica impugnatura permette l'impiego delle tradizionali fonti di luce alogene, a LED e a batteria ricaricabile Sapi Med, garantendo un livello di illuminazione ottimale e rendendo i rettoscopi Sapi Med strumenti multi-light a tutti gli effetti.

Le impugnature dei rettoscopi Sapi Med sono compatibili - tramite raccordo di collegamento - alle telecamere Sapitech o ai sistemi di acquisizione immagini **GIÀ PRESENTI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE** (es. colonna laparoscopica delle sale operatorie).

*The **disposable rectoscopes of Sapi Med** are smooth and made in plastic material with graduation. Each tube has a grip with magnifying lens, connector for insufflator, air insufflator and built-in LED light source. Removing the transparent tab the LED powers on. Guaranteed same light intensity for two hours usage.*

*At the end of the examination, by lifting the tab placed on the base of the penlight it will open in two parts allowing the separate disposal of its parts (metal, batteries, plastic).*

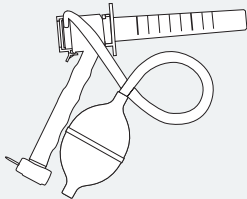
*The unique handle allows the usage with Sapi Med LED light sources or flash-light and also with the new eco-friendly pen-LEDs, guaranteeing optimal illumination and making Sapi Med instruments multi-light devices.*

*Compatible, through adapter, to Sapitech cameras or to systems of image acquisition **ALREADY AVAILABLE IN HOSPITALS** (for example operating theatres laparoscopic column).*

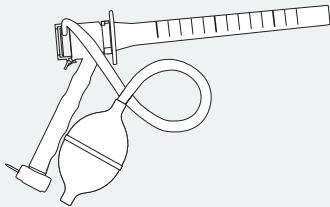
**Kit Rettoscopi a LED incorporato con insufflatore.**  
**Kit Rectoscopes with built-in LED light with insufflator.**

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assenza assoluta di sbavature</li> <li>• Garantiti atraumatici</li> <li>• Illuminazione a LED amovibile e non ricaricabile</li> <li>• Serigrafia centimetrica</li> <li>• Impugnatura e illuminazione a LED separabili per lo smaltimento</li> <li>• Realizzati in materiale plastico di grado medicale, idoneo al contatto con gli alimenti</li> <li>• Impugnatura multi-light con lente 2X</li> <li>• Insufflatore d'aria</li> <li>• Non contengono lattice</li> <li>• Non sterile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Flash free</i></li> <li>• <i>Guaranteed atraumatic</i></li> <li>• <i>Removable and non-rechargeable LED light</i></li> <li>• <i>External cm marking on tubes</i></li> <li>• <i>Separable grip and LED lighting for safe disposal</i></li> <li>• <i>They are made of plastic material conforms to the legislation 10993-1 regarding the biocompatibility</i></li> <li>• <i>Multi-light handle with 2X magnifying lens</i></li> <li>• <i>Air insufflator</i></li> <li>• <i>Latex free</i></li> <li>• <i>Non sterile</i></li> </ul>

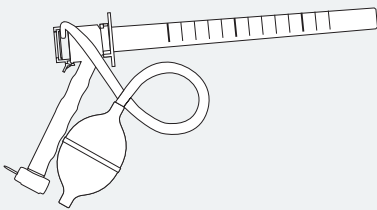
**REF A.4513LINS €€**

	<p>Tubo trasparente          Lunghezza: 130 mm          Diametro interno: 17 mm          Diametro esterno: 19,6 mm</p> <p><b>Confezione:</b>          n° 20 tubi + 20 imp. con Pen LED Light          + 20 insufflatori</p>	<p><i>Transparent tube</i>  <i>Length: 130mm</i>  <i>Internal diameter: 17mm</i>  <i>External diameter: 19,6mm</i></p> <p><b>Quantity per box:</b>          20 tubes + 20 grips with Pen LED Light          + 20 insufflators</p>
--	---	---

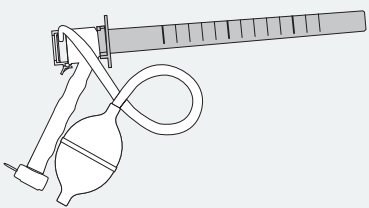
**REF A.4520LINS €€**

	<p>Tubo trasparente          Lunghezza: 200 mm          Diametro interno: 12,5 mm          Diametro esterno: 15,1 mm</p> <p><b>Confezione:</b>          n° 20 tubi + 20 imp. con Pen LED Light          + 20 insufflatori</p>	<p><i>Transparent tube</i>  <i>Length: 200mm</i>  <i>Internal diameter: 12,5mm</i>  <i>External diameter: 15,1mm</i></p> <p><b>Quantity per box:</b>          20 tubes + 20 grips with Pen LED Light          + 20 insufflators</p>
---	---	---

**REF A.4525LINS €€**

	<p>Tubo trasparente          Lunghezza: 250 mm          Diametro interno: 17 mm          Diametro esterno: 19,6 mm</p> <p><b>Confezione:</b>          n° 20 tubi + 20 imp. con Pen LED Light          + 20 insufflatori</p>	<p><i>Transparent tube</i>  <i>Length: 250mm</i>  <i>Internal diameter: 17mm</i>  <i>External diameter: 19,6mm</i></p> <p><b>Quantity per box:</b>          20 tubes + 20 grips with Pen LED Light          + 20 insufflators</p>
---	---	---

**REF A.4525VLINS €€**

	<p>Tubo verde          Lunghezza: 250 mm          Diametro interno: 17 mm          Diametro esterno: 19,6 mm</p> <p><b>Confezione:</b>          n° 20 tubi + 20 imp. con Pen LED Light          + 20 insufflatori</p>	<p><i>Green tube</i>  <i>Length: 250mm</i>  <i>Internal diameter: 17mm</i>  <i>External diameter: 19,6mm</i></p> <p><b>Quantity per box:</b>          20 tubes + 20 grips with Pen LED Light          + 20 insufflators</p>
---	---	---